

Behandlingsbadkar

Installationsanvisning - Användarhandbok



Neptun
Bad & Spa

2007:1

www.neptunbath.com

Innehållsförteckning

Kap.	Sid.
1. Före installation	2
2. Specifikationer	2
3. Installation	3
4. Användarinstruktion	4
5. Varningar	6
6. Medicinska risker	6
7. Löpande underhåll och desinfektion	8
8. Garantivillkor	9
10. Garantisedel	11

1. Före installation

FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV NEPTUN BEHANDLINGSBADKAR, VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL.

2. Specifikationer

Tomvikt	ca 155 kg
Vattenvolym	ca 450 l
VVS	
Inkommande varm/kallvatten	3/4" ledning
Avloppsstam	110 mm
Golvbrunn	120 l/min
Munstycken till handdriven hydro	4, 8, 10, 12 och 14 mm

EL	
Inkommande matning	3x16 A, 400/230 VAC, 50 Hz
Pump 1	2,2 kW
Pump 2	1,5 kW

Notera att behandlingsbadkaret har fasföljdsvakt installerad och vid felaktig fasföljd går det ej att få i drift.

3. Installation

Placera behandlingsbadkaret på avsedd plats.

Justera fötterna tills behandlingsbadkaret står i våg. Spänn därefter samtliga fötter med kontramuttrarna.

Anslut blandaren till varmt och kallt vatten med tryckslang, 3/4" (ingår ej).

Avloppsanslutningen under karet är 75 mm (ingår ej). För att kunna evakuera vattnet bör avloppsstammen vara 110 mm samt att golvbrunnen har en kapacitet på minst 120 l/min.

Koppla in matningen för el. Kabeln skall vara dimensionerad för 3x16 A. Behandlingsbadkaret skall vara fast installerat och föregås av allpolig arbetsbrytare. Systemspänningen är 400/230 VAC, 50Hz. I utrustningen finns fasföljdsvakt installerad så vid felaktig fasföljd går behandlingsbadkaret ej att få i drift.

Installationen skall utföras av behörig elinstallatör.

Montera sidopanelerna och fixera med skruvarna.

4. Användarinstruktion

4.2.1 Påfyllning av vatten.

Öppna kallvattenvredet (2) och varmvattenvredet (1).
Behandlingsbadkaret fylls på via vattenutkastare (3).

4.2.2 Användande av hydromassagesystem.

- Fyll upp behandlingsbadkaret med vatten.
- Koppla på hydromassagesystemet med tryckknapp (8).
- I händelse av att vattentrycket inte är tillräckligt, lägg till luft i hydromassagejetsen med hjälp av vred (9).
- Det ökar intensiteten i massagen.
- För att avsluta massagen tryck åter igen på tryckknapp (8).

4.2.3 Användande av luftmassage.


- Fyll upp behandlingsbadkaret med vatten.
- Koppla på luftmassagen med tryckknapp (10).
- Ställ in önskad intensitet i luftmassagen med vred (11).
- För att avsluta massagen tryck åter igen på tryckknapp (10).

4.2.4 Användande av handhållen hydromassageenhet.

- Fyll upp behandlingsbadkaret med vatten.
- Koppla på handhållen hydromassageenhet med tryckknapp (4).
- Handenheten måste samtidigt hållas stadigt i handen.
- Ställ in önskat tryck i enheten med regulator (5). Vattentrycket visas i manometer (7).
- För att avsluta massagen tryck åter igen på tryckknapp (4).

Efter avslutad behandling och tömning av behandlingsbadkaret, koppla på luftmassagen för att tömma rörledningarna från vatten.

- 1 Varmvattenvred
- 2 Kallvattenvred
- 3 Vattenutkast
- 4 ON/OFF-brytare för handenhet
- 5 Massageregulator för handenhet
- 6 Handhållen hydromassageenhet
- 7 Manometer (visar vattentrycket i handenheten)
- 8 ON/OFF-brytare för hydromassage
- 9 Luftvred för hydromassage
- 10 ON/OFF-brytare för luftmassage
- 11 Ökar/minska luftmassagen
- 12 Belysning chromoterapi

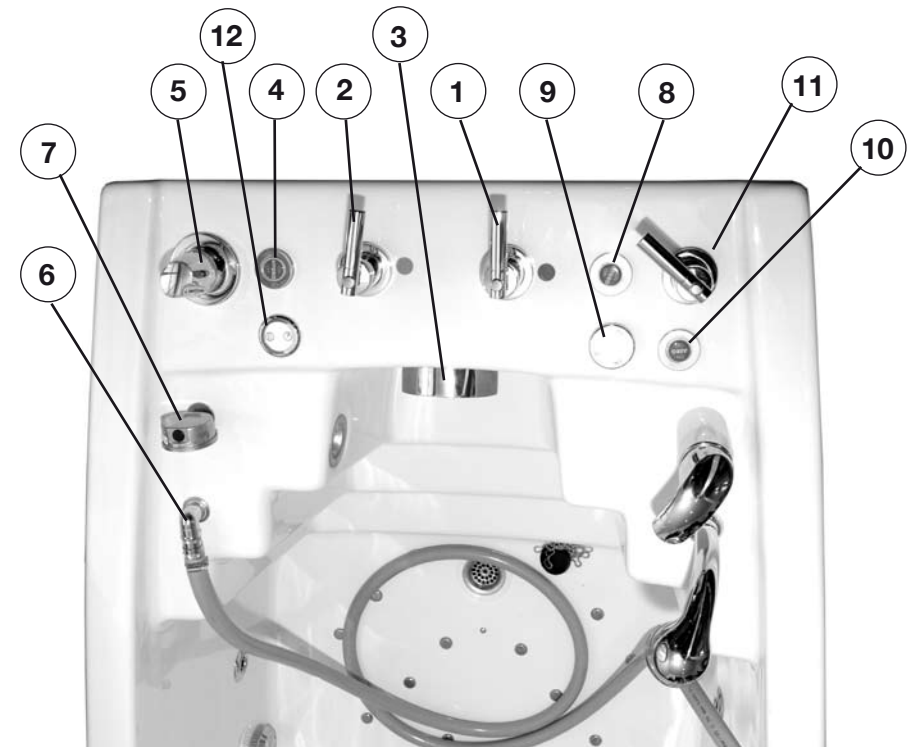

5. Varningar

Vid påfyllning av behandlingsbadkaret får vattnet ej överstiga 60°C.

Håll aldrig i kokande vatten i behandlingsbadkaret.

Koppla aldrig på hydromassagen eller den handhållna hydro-massageenheten när behandlingsbadkaret är tomt.

Vid driftstörningar koppla ifrån arbetsbrytaren till strömmatningen omedelbart och tillkalla service.

Använd aldrig ett defekt behandlingsbadkar!

6. Medicinska risker

Om den badandes hälsa försämras vid användande av Svenska Neptun AB:s behandlingsbadkar, skall behandlingen avbrytas.

Hjärt- och kärlsjukdomar - Uppvärmningsprocessen kan medföra ökad hjärtfrekvens och ökat hjärarbete som leder till överbelastning.

Högt blodtryck - Personer med högt blodtryck bör särskilt beakta att uppvärmningsprocessen kan leda till ökad hjärtfrekvens som medför överbelastning av hjärtat.

Tumör - Var extra försiktig och konsultera läkare.

Blödning - Personer med blödningsrisk måste iakttaga försiktighet. Värmen orsakar vidgning av blodkärlen vilket ökar risken för blödning, varför personer med blödarsjuka eller annan allvarlig blödningsbenägenhet skall avstå från behandlingen.

Nedsatt känsel - Om vattnet i behandlingsbadkaret är för varmt eller för kallt, kan detta orsaka skador på personer med nedsatt känsel.

Nedsatt allmäntillstånd - Behandlingen kan förvärra ett redan nedsatt allmäntillstånd.

Blodbrist - Då kroppen är nedsänkt i varmt vatten kan syreupptagningsförmågan minska om personen har blodbrist.

Hudproblem - Behandling bör undvikas om hudirritation förvärras. Infekterade hudblåsor kan brista på grund av vidgning av blodkärl.

Graviditet - Varma bad i samband med graviditet kan orsaka fosterskador.

Kärlsjukdom i armar eller ben - Vattenmassage får ej användas vid infektion eller propp i djupa blodkärl. Vid åderförkalkning kan värmebehandling öka syrebehovet och därmed förvärra allmäntillståndet.

Puls - Hjärtfrekvensen får inte överstiga 140 slag per minut. Hög hjärtfrekvens kan skada hjärtat.

Diabetes - Behandling i varmt vatten skall undvikas för personer med Typ 1-diabetes på grund av nedsatt känsel och dålig blodcirkulation.

Infektion - Vid akut infektion i huden eller lederna skall behandling i varmt vatten undvikas under de första 48 timmarna eller till dess att symptomen försvunnit.

7. Löpande underhåll och desinfektion

7.1. Vid rengöring av behandlingsbadkarets yta, använd en mjuk trasa eller svamp med flytande rengöringsmedel utan slipmedel.

Rengöringspulver, slippasta eller flytande rengöringsmedel med slipmedel samt grova rengöringstraror som kan orsaka repor får ej användas vid rengöring av behandlingsbadkaret.

7.2. Efter var 15:e behandling (alt. varje dag vid lägre bokningsfrekvens) skall behandlingsbadkaret rengöras med desinfektionsmedel.

7.2.1. Desinfektionsprocess

- Fyll behandlingsbadkaret med vatten så att jetsen är ca 5 cm under vattenytan.
- Håll i ca 1 dl desinfektionsmedel per 100 liter vatten.
- Koppla på hydromassagesystemet i ca 5 min.
- Låt blandningen stå i ca 30 min.
- Töm ur vattnet.
- Spola behandlingsbadkaret med duschen.
- Fyll åter upp med kallt vatten så att jetsen är ca 5 cm under vattenytan.
- Starta behandlingsbadkaret i ca 10 sek.
- Töm åter ur vattnet.

7.3. I händelse av att periodisk rengöring inte är tillräcklig, kör desinfektionsprocessen så ofta som det behövs.

8. Garantivillkor

8.1. Garantins giltighet förutsätter ett korrekt ifyllt garantidokument.

8.2. Garantin omfattar materialfel, konstruktionsfel på detaljer samt fabrikationsfel. För kringutrustning ansluten till behandlingsbadkaret samt för kostnader uppkomna i samband med driftstörningar omfattas ej av garantin.

8.3. En av Svenska Neptun AB auktoriserad personal utför garantireparationer under en period av 12 månader från förvävsdatum.

8.4. Garantitiden börjar när behandlingsbadkaret är installerat samt att instruktioner och skötselanvisningar är genomgångna av personal från Svenska Neptun AB.

8.5. Personal från Svenska Neptun AB avgör ensamma om delar av eller helt behandlingsbadkar skall bytas ut eller repareras.

8.6. Förutsättning för garantireparation är att serviceutrymme lämnas på minst 0,6 m från produkten.

8.7. Garantin gäller ej under följande omständigheter:

- Om produkten är tillfälligt eller felaktigt ansluten till el eller vatten.
- Om avloppet är felaktigt dimensionerat.
- Om vattentillförseln är felaktigt dimensionerad.
- Vid fel orsakade av åsknedslag, rostangrepp eller elektrolys.
- Vid transportskador orsakade av hantering utanför tillverkarens kontroll.
- Om signatur från kund eller dennes representant som godkänt installationen saknas på garantidokumentet.

8.8. Tillverkaren är ej ansvarig för skador orsakade av driftstörningar eller andra fel på anläggningen.

8.9. Garantireparationer gäller ej vid:

- Skador uppkomna av felaktigt handhavande.
- Felaktigheter i installationen som upptäcks senare än 3 månader från installationstillfället.
- Förslitningsskador orsakade av normalt användande.
- Byggnadsarbeten eller dylikt som är nödvändiga för att garantireparation skall kunna utföras, till exempel om behandlingsbadkaret är inbyggt så att service ej kan utföras.

9. Garantisedel

Modell

Tillverkningsdatum

Återförsäljare

Försäljningsdatum

Installationsdatum samt installatörens namn

Mottagare av produkten (köpare eller auktoriserad återförsäljare)

Garaniperiod

Noteringar

Svenska Neptun AB - Grustagsgatan 13 - 254 64 Helsingborg
Tel. 042-38 08 90 - Fax 042-16 45 70

www.neptunbath.com